

Mentor – Ett företag med omtanke

Mentor grundades 1969 och är en ledande leverantör av medicinska produkter i mer än 60 länder världen över. Såsom världsledande tillverkare av högkvalitativa bröstimplantat under mer än 25 år resulterar vår erfarenhet i kvalitetsprodukter som du kan lita på.



Mentors silikonfyllda bröstimplantat är tillverkade i vår högteknologiska produktionsanläggning i Leiden, Nederländerna. Denna avancerade produktionsanläggning är den största av sitt slag i världen. Den visar upp många genombrytande teknologiska framsteg vilka är nya inom bröstimplantats-industrin.



Mentor utför forskning, utveckling och produktion vid ett flertal anläggningar i Europa och USA. Företaget har också försäljning och distributionskanaler världen runt. Mentor var den första implantatstillverkaren som lyckades erhålla CE-märkning för dess produkter.



Mentor är stolt över kvaliteten som är integrerad i vart och ett utav våra bröstimplantat och patienter kan vara säkra på att bakom deras beslut att använda sig av våra produkter finns ett företag med omtanke.



Valmöjligheter inom Bröstförstoring

Introduktion (1)

Bröstets anatomi (1)

Incisions- och
placeringsval (2)

Typer av implantat (3)

Operation (4)

Återhämtning (5)

Garanti (6)

Att fråga din kirurg (6)

Mentor (7)



 MENTOR

Introduktion


För många kvinnor förutsätter ett själsligt välbefinnande att man är nöjd med sin kropp. Även fast det inte är alla kvinnor som känner behov av en bröstförstoring så har detta ingrepp resulterat i en stor personlig tillfredsställelse för tusentals kvinnor.

Varje kvinna överväger bröstförstoring av sina egna personliga skäl såsom:

- Förstoring av hennes bröst för att skapa en mer proportionelig kropp.
- Återskapa och förstora bröst som har förlorat sin form pga amning.
- Skapa en balans mellan bröst som skiljer sig i storlek eller form.

Dina skäl är väldigt personliga och dina val rörande bröstförstoring skall göras av dig och din läkare baserat på dina personliga behov, önskningar och förväntningar.

Idag finns det många valmöjligheter för kvinnor som finner att bröstförstoring är det rätta för dem. Den här broschyren är framtagen för att hjälpa dig att förstå mer om bröstförstoring och alla de valmöjligheter du har. Den är inte tänkt att ersätta några diskussioner mellan dig och din läkare.

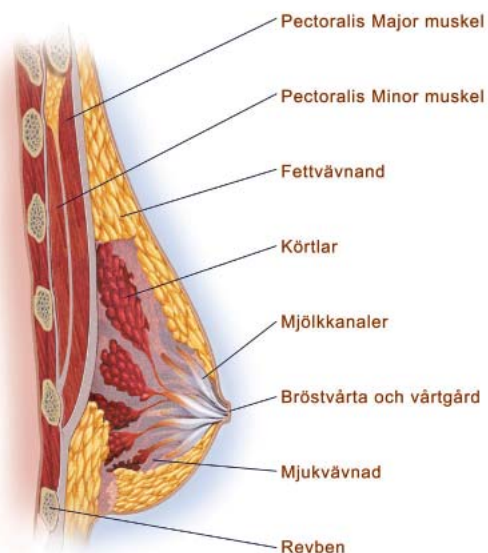

Bröstets anatomi

Bröstat är uppbyggt av fett, körtel- och bindväv. Inne i bröstet finns blodkärl, mjölkkkanaler, fett, glandulärvävnad och känselnerv. Bakom bröstet ligger Pectoralis major, vilken är en stor muskel som hjälper till vid armrörelse.

Mentors livstids utbytespolicy

Ditt val att använda Mentors bröstimplantat till din bröstförstoringsoperation är ett personligt, långsiktigt val. Då bröstimplantat troligen inte kommer att hålla under hela ditt liv, stöttar Mentor ditt beslut genom att starkt stå bakom sin policy om livstids produktutbyte. Under hela din livstid kommer Mentor att ersätta, utan kostnad, ett likadant eller liknande bröstimplantat om utbyte av implantatet är nödvändigt.

Frågor att ställa din plastikkirurg

- Vilka är mina valmöjligheter inom bröstförstoring?
- Vilka är de möjliga riskerna och komplikationerna associerade med en bröstimplantatoperation?
- Vilken form, storlek, yttexturering, incisionsområde och placering är rekommenderat för mig?
- Hur påverkas min möjlighet att amma?
- Hur kan jag förvänta mig att mina förstörade bröst kommer att se ut på sikt?
- Har ni före och efter foton som jag kan titta på?



Före

Före

Före



Efter

Dr. Fabian Weiller
(Tyskland)

Efter

Dr. Claudio De Lorenzi
(Canada)

Efter

Dr. Bill Adams
(USA)

Din återhämtning

Du kommer troligen att känna dig lite öm under flera dagar efter din bröstförstoringsoperation. De första 24 till 72 timmarna efter ingreppet är tiden då du kommer att uppleva det största obehaget. Dina bröst kommer att vara svullna och väldigt ömma. Även fast varje kvinnas återhämtning är olika, bör du efter en vecka kunna återgå till lätta aktiviteter.

En viktig del av din återhämtning kan infatta bärandet av en postoperativ behå eller andra kompressionstextilier. Dessa är designade för att ge ett extra stöd under läkningstiden. Din doktor kan möjligen också ha andra specifika förslag till dig att följa medan du återhämtar dig. Om några problem skulle uppstå efter din bröstimplantatoperation, kontakta din doktor omedelbart.

Incisions- och placeringsval

Incisioner

Bröstförstoring utförs i normala fall genom att använda en av de tre vanligaste incisionsställena: periareolärt, submammarfåran eller axillärt.

- Periareolärt (via bröstvårtan)

Denna incision har fördelen att den syns minst. Dock kan den skapa komplikationer vid amning.


- Submammarfåran

(via vecket under bröstet)

Denna incision är mycket populär då den döljs av skinnvecket under bröstet.

- Axillärt (via armhålan)

Denna incision är mindre dold, dock kan det vara ett bra val för kvinnor som inte vill ha några ärr på sina bröst.

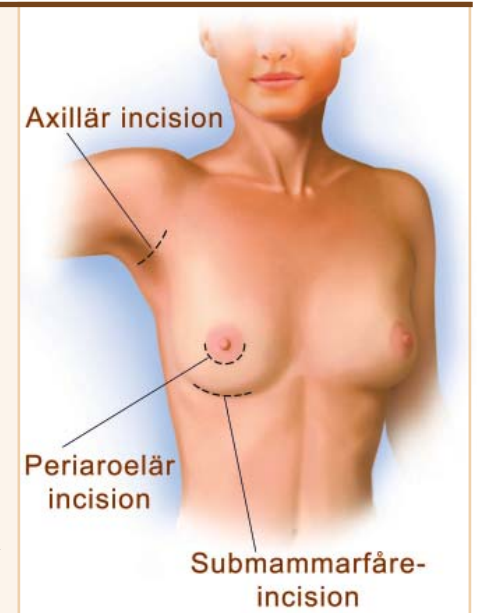


Din doktor kommer att förklara varje incisionsval för dig mer i detalj och hjälper dig med att göra ett val som passar dig.

Placering

Under ett bröstförstoringsingrepp kommer dina implantat att antingen placeras under bröstmuskeln (submuskulärt) eller ovanpå muskeln och under bröstkörtlarna (subglandulärt).

En submuskulär placering kan minska risken för att dina implantat kan kännas genom skinnen, och det kan också minska risken för att ärrvävnad förhårdnar runt dina implantat. Det kommer också att göra det enklare att undersöka dina bröst vid en mammografi. Möjliga nackdelar med detta placeringsval kan vara en längre operations- och återhämtningstid.

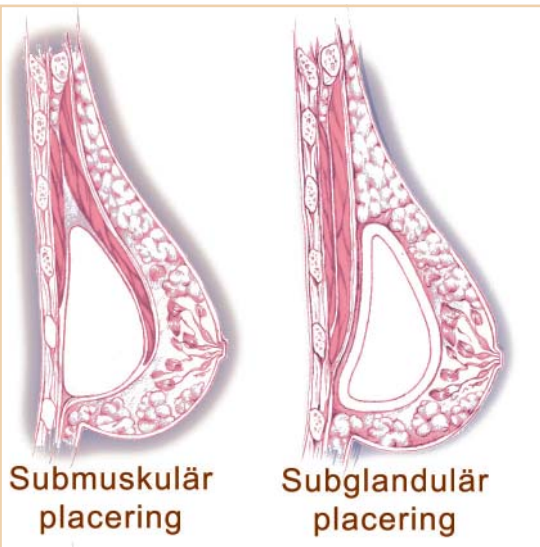

Subglandulär placering kan göra din förstoringsoperation kortare och reducera din återhämningsperiod. En möjlig nackdel kan vara att implantatets kanter kan synas tydligare under ditt skinn. En mammografiundersökning kan också vara svårare när dina implantat är placerade subglandulärt.

Din doktor kan samtala med dig om de olika placeringsalternativen relaterat till dina individuella behov, så att du kan göra ett val som passar dig.

Typer av bröstimplantat

Det finns två stycken huvudtyper av bröstimplantat:

Silikonfyllda bröstimplantat och koksaltfyllda bröstimplantat.

Mentor har tillverkat både silikonfyllda implantat och koksaltfyllda bröstimplantat under mer än 30 år. Såsom en marknadsledare, möter bröstimplantaten som tillverkas av Mentor strikta tillverkningsstandarder och är av högsta kvalitet.

Silikonfyllnadsmaterialet

Silikonfyllda bröstimplantat är fyllda med en sammanhängande silikonsubstans.

Mentor erbjuder silikonfyllda implantat med tre varianter av fyllnadsmaterial: standard, moderat och hög. Contour Profile Gel® är fylld med det starkast sammanhängande silikonet för att upprätthålla dess naturliga form.

Koksaltfyllda bröstimplantat

Koksaltfyllda bröstimplantat är fyllda med saltvatten. För många kvinnor är valet av bröststorlek den svåraste delen av valet av implantat. Mentors Runda och Contour Profile Spectrum® implantat är de enda

koksaltfyllda bröstimplantat med en borttagbar påfyllnadsslang vilket tillåter din läkare att justera storleken på dina implantat upp till sex månader efter din operation genom att antingen tillföra eller avlägsna koksalt genom påfyllnadsslangen.

Implantatformer

Beroende på den bröstform som du önskar uppnå, kan du och din doktor välja antingen runda eller anatomiskt formade implantat. Anatomiskt formade implantat har formen av en vattendroppe och kan erbjuda patienten ett mer naturligt utseende av bröstet.

Mentors bröstimplantat har varierande grader av projektion: standard, moderat och hög. Det senaste tillskottet är högprofilsimplantat för kvinnor som önskar större projektion och har en smal bröstkorg.

Implantatyta

Bröstimplantat tillverkas med antingen en slät eller texturerad yta. Implantat med en slät yta har ett något mjukare hölje och minskar därmed risken för att man ska kunna känna implantat genom huden. Materialet på Mentors texturerade implantat kallas Siltex®.

Rådgör med din kirurg om de många valmöjligheter av bröstimplantat från Mentor som finns tillgängliga. Grundat på din kroppstyp och förväntningar, kan han eller hon hjälpa dig att välja en implantatmodell som passar just din bröstförstoring.

Din operation

Bröstförstoringsingrepp utförs normalt på ett sjukhus eller på en privat klinik. Du kan normalt gå hem samma dag som du genomgått operationen. Vid placering av implantatet under muskeln kan det dock vara en fördel att ligga kvar ett dygn på sjukhuset/kliniken. Operation sker vanligen under narkos så du kommer att sova under ingreppet. Operation pågår normalt under en till två timmar. Din doktor kommer att göra en incision och forma en ficka i vilken bröstimplantatet placeras. När implantatet är placerat i korrekt läge sluts incisionen med stygn.

För att åstadkomma bästa möjliga resultat och för att göra din återhämtning så snabb som möjligt kommer din kirurg att diskutera specifika kirurgiska tekniker med dig som passar bäst för dina individuella behov och förväntningar.